

<p>Versión 00 Fecha: 29/07/2024</p>	<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO</p> <p style="text-align: center;">Solicitud de turnos y envío de muestras</p> <p style="text-align: center;">Página 1 de 2</p>	 <p style="text-align: center;">CUCAIBA Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de la Provincia de Buenos Aires</p> <p style="text-align: center;">Centro Provincial de Histocompatibilidad</p>
---	--	--

1. La solicitud del turno es el primer paso antes de realizar el envío de muestras, o de dirigir al paciente al Centro Provincial de Histocompatibilidad para una extracción de sangre.
 - 1.1. La solicitud de turno debe realizarse mediante correo electrónico a inmunologiacucaiba@gmail.com
2. Todas las solicitudes, sin excepción, deben llevarse a cabo adjuntando al mail la "Orden de solicitud de estudios", completa en todos sus campos, firmada por la autoridad correspondiente (escaneada en formato PDF).

Importante: no se realizarán estudios, ni se recepcionarán muestras, sin turno previo.

3. Horarios de ingreso de muestras y extracciones:

- 3.1. Las muestras deben ser ingresadas al Centro Provincial de Histocompatibilidad de 8 a 10 horas. Caso contrario, las mismas no se procesarán.
- 3.2. Los pacientes deben presentarse para extracción de 8 a 10 horas.

4. Tipos de muestras:

- 4.1. **Para HLA (pacientes y/o donantes):** 2 tubos con EDTA, con 2.5ml. de sangre periférica por tubo y por persona.
- 4.2. **Para PRA o DSA (sólo pacientes):** 1 tubo seco, +/- 5 a 10 ml., sin anticoagulante, con sangre periférica o suero.
- 4.3. **Para crossmatch por citometría de flujo:**
 - 4.3.1. Pacientes: 1 tubo seco, +/- 5 a 10 ml., sin anticoagulante, con sangre periférica o suero.
 - 4.3.2. Donantes: 10 tubos con EDTA, con 2.5ml de sangre periférica por tubo y por donante.

Si los donantes deben ser tipificados para HLA, sumar un tubo más con EDTA.

Elaboración: 10/07/2024	Revisión: 11/07/2024	Aprobación: 29/07/2024
<p>Participantes del proceso: Equipo del Centro Provincial de Histocompatibilidad del CUCAIBA.</p>	<p>Responsable del proceso: Departamento de Calidad del CUCAIBA y responsable de Calidad del Centro Provincia de Histocompatibilidad.</p>  	<p>Jefe del Centro Provincia de Histocompatibilidad: Gustavo Piccinelli</p> 

Versión 00 Fecha: 29/07/2024	INSTRUCTIVO Solicitud de turnos y envío de muestras Página 2 de 2	 CUCAIBA Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires Centro Provincial de Histocompatibilidad
---------------------------------	---	--

5. Si las muestras para HLA hubieran sido extraídas con anterioridad al día del envío, deben conservarse en heladera.
6. Los tubos de suero deben ser extraídos en el mismo día. Si por alguna contingencia se hubiesen extraído el día anterior al envío, deben conservarse en heladera
7. **Todas las muestras (sin excepción) deben estar rotuladas y debidamente identificadas con nombre completo del paciente, Nº DNI y fecha de extracción de la muestra.** No se procesarán muestras que incumplan estos requisitos de identificación, ya que es indispensable asegurar la trazabilidad de las muestras y las posibilidades de error en la fase preanalítica, mediante el correcto rotulado.
8. Sólo se aceptarán muestras congeladas para HLA, PRA o DSA con consulta previa a la solicitud del turno.

Importante: toda muestra que no cumpla con los requisitos explicitados previamente no será procesada, y por consiguiente, descartada. El Centro Provincial de Histocompatibilidad dará aviso al remitente de la misma.

9. Cuando la solicitud de turno y estudios corresponda a pacientes renales, éstos deben tener en SINTRA la evaluación clínica finalizada (hasta tanto este requisito no esté cumplimentado, no se otorgará el turno).
10. Cuando la solicitud de turno y estudios corresponda a pacientes para trasplante de médula ósea, el paciente debe estar inscripto en el registro de la Dirección de Redes de Unidades Públicas de Trasplante del CUCAIBA (hasta tanto este requisito no esté cumplimentado, no se otorgará el turno).